



Brukerhåndbok

Ride™ Corbac™ justerbar ryggstøtte



Ride Designs®

en gren av Aspen Seating, LLC

8100 SouthPark Way
Littleton, Colorado 80120 USA

tollfritt (kun USA): 866.781.1633
telefon: 303.781.1633
www.ridedesigns.com

Leverandør: Denne håndboken må overføres til sluttbrukeren av produktet da den inneholder viktig informasjon for riktig bruk av dette produktet.

Bruker: Les hele håndboken nøye før du bruker dette produktet, og oppbevar den for fremtidig bruk.

Tiltenkt bruk og monteringsinstruksjoner

Tiltenkt bruk

Ride Designs® Corbac™ er en justerbar ryggstøtte for rullestoler som er nøye konstruert for å tilfredsstille behov knyttet til kroppsholdning og hudintegritet, og er designet for å monteres på flere typer rullestoler i ulike størrelser for å gi rullestolbrukere støtte og enklere posisjonering.

Vektkapasitet

Maksimalbrukervekt er 113 kg.



Generell produktsikkerhet

Sikker bruk av dette produktet er avhengig av at du og din leverandør, omsorgsperson, og/eller annet helsepersonell viser god dømmekraft og sunn fornuft, og at du er oppmerksom på og følger advarslene, merknadene og instruksjonene i denne håndboken.

MERK: Vi har satt sammen denne håndboken fra de nyeste spesifikasjonene og produktinformasjonen som var tilgjengelig på publiseringstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når det blir nødvendig. Eventuelle endringer i produktene våre kan føre til mindre variasjoner mellom illustrasjoner og forklaringer i denne håndboken og produktet du har kjøpt.

⚠ ADVARSEL: All Ride Designs-støtteflater er utformet for å redusere forekomsten av trykksår. Ingen ryggstøtte kan imidlertid eliminere sittetrykk eller hindre trykksår fullstendig. Ride Corbac er ikke ment til å erstatte god hudpleie og riktig kosthold, renslighet og regelmessige trykkavlastningsteknikker.

FORSIKTIG: Unnlattelse av å følge advarsler kan føre til skade på produktet.

⚠ Les denne håndboken før du bruker dette produktet.

⚠ ADVARSEL: All Ride Designs støtteflater er utformet for å redusere forekomsten av trykksår. Ingen ryggstøtte kan imidlertid eliminere sittetrykk eller hindre trykksår fullstendig. Ride Corbac er ikke ment til å erstatte god hudpleie og riktig kosthold, renslighet og regelmessige trykkavlastningsteknikker.

⚠ Å montere en pute på en rullestol kan påvirke tyngdepunktet til rullestolen. En tilbaketrukket ryggposisjon kan føre til at rullestolen tipper bakover og forårsaker skade. Vurder alltid om det er nødvendig å montere støtteben eller justerbar akselstøtte for å justere akselavstanden for personer med amputerte ben på rullestolen for å øke stabiliteten. En mer fremoverrettet ryggposisjon kan på samme måte redusere stabiliteten til rullestolen fremover, og dermed øke risikoen for at rullestolen tipper fremover og forårsaker skade.

⚠ Ikke bruk Corbac uten tråddukoverlegg på plass.

⚠ Ikke løft rullestolen ved Corbac.

⚠ Feilaktig plassering eller festing av Ride Corbac til rullestolen kan føre til skade.

⚠ Dette produktet må installeres og monteres av et kvalifisert og kompetent helsepersonell. Unnlattelse av å vurdere og justere passformen til Corbac nøyaktig kan føre til skade på brukeren.

Instruksjoner for montering og bruk

Det anbefales at en leverandør eller terapeut sertifisert av Ride Designs gjennomfører den innledende monteringen av ryggstøtten. Ride Corbac er designet for å forbedre torso-støtten ved å gi posterior og lateral støtte til den nedre delen av torsoen, korsryggen og bekkenet (dvs. kjernen). Den justerbare Corbac-fatningen bruker stropper for å oppnå den innledende støtten for balanse og justering. TLP-støttene (thoraco-lumbar-pelvic) gir ytterligere posterior/lateral støtte og tråddukoverlegget til Corbac gir en lett dempende støtte gjør at fuktighetsdamp kan transporteres samtidig som forskyvning reduseres.

Corbac består av fire komponenter: 1) den justerbare fatningen, 2) to thoraco-lumbar-bekken-støtter (TLP), 3) tråddukoverlegg og 4) fire festeklemmer.

Fastslå egnede monteringsinstruksjoner

Før installasjon må du fastslå hvilken konfigurasjon som er nødvendig og gå videre til den riktige delen av håndboken:

- Hvis du bytter justerbar ryggstøttepolstring med spennerem på en rullestol UTEN skyvehåndtak, se avsnittet "Erstatt eksisterende ryggstøttepolstring med spennerem på en rullestol uten skyvehåndtak".
- Hvis du bytter ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol som har ryggør med integrerte skyvehåndtak og eksisterende gjengeinnsatser, se avsnittet "Erstatt eksisterende ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol med skyvehåndtak og eksisterende gjengeinnsatser".
- Hvis du bytter ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol med integrerte skyvehåndtak, men UTEN gjengeinnsatser, se avsnittet "Erstatt ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol som har ryggør med integrerte skyvehåndtak, men ingen eksisterende gjengeinnsatser".
- Hvis du installerer Corbac over eksisterende justerbar ryggstøttepolstring med slynge, se avsnittet "Installer Corbac over eksisterende justerbare ryggstøttepolstring med slynge".


Corbac-montering



Erstatt eksisterende justerbar ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol uten skyvehåndtak


1. Fjern den eksisterende ryggstøttepolstring med slyngeen.
2. Juster høyden på ryggørene (hvis det er aktuelt) for ønsket ryggstøttehøyde.
3. Skyv den justerbare Corbac-fatningen på ryggørene til rullestolen.
 - a. Fjern den justerbare Corbac-fatningen fra pappemballasjen. Ikke brett den ut.
 - b. Finn lommene til ryggørene på innsiden av bakpanelet og under justeringsstroppene. Reflekterende tape identifiserer åpningen av rørlommene.
 - c. Skyv rørlommene til den justerbare Corbac-fatningen over ryggørene på rullestolen. (Du må kanskje løsne de justerbare fatningstroppene.)

⚠ Unnlattelse av å bruke ryggørlommene kan føre til at Corbac sklir ned ryggstøttene, som i sin tur kan føre til skade for brukeren.
4. Stram til justeringsstroppene litt. På noen stive modell rullestoler finner du én eller flere av de nederste justeringsstroppen(e) under oppstrammerstangen.
5. Trekk ned og fest den tynne klaffen til seteslyngen for å gi tilstrekkelig slark til å plassere puten mot ryggørene.
6. Monter seteputen på riktig sted.
7. Fortsett til kapitlet "Montering av Corbac".

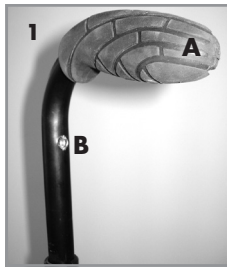

Erstatt eksisterende ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol med skyvehåndtak og eksisterende gjengeinnsatser

1. Bekreft at Corbac skal brukes uten den opprinnelige ryggstøttepolstring med slyngeen og at ryggstøttene er utstyrt med skyvehåndtak (A) og gjengeinnsatser (B) som vist i bilde 1.
2. Fjern den justerbare Corbac-fatningen fra pappemballasjen. Ikke brett den ut.
3. Finn stor lomme under justeringstroppene.
4. Skyv den justerbare Corbac-fatningen på ryggrorene til rullestolen ved å skyve håndtakene gjennom hullene i de øvre og sidestilte hjørnene av den store lommen.
5. Juster snøreringene på Corbac-fatningen med den originale gjengeinnsatsen på rullestolen.
6. Sett inn skruen fra den opprinnelige ryggstøttepolstring med slyngeen gjennom snørehullet og inn i gjengeinnsatsen og stram til (bilde 2).
7. Stram til Corbac Mount-strammebåndet forsiktig. På noen stive modell rullestoler finner du den/de nederste justeringsstroppen(e) under oppstrammerstangen.
8. Trekk ned og fest den tynne klaffen på seteslyngeen for å gi tilstrekkelig slark til å plassere en pute mot ryggrorene.
9. Monter seteputen på riktig sted.
10. Fortsett til kapitlet "Montering av Corbac".

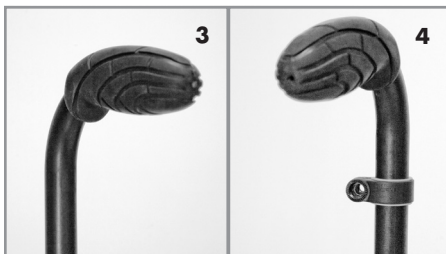

Erstatt ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol som har ryggør med integrerte skyvehåndtak, men ikke eksisterende gjengeinnsatser

1. Bekreft at Corbac skal brukes uten ryggstøttepolstring med slyngeen og at ryggstøttene er utstyrt med skyvehåndtak, men ikke har eksisterende gjengeinnsatser som vist i (bilde 3).
2. Fastslå rørdiameteren på stedet der toppen av Corbac-høyden skal være.
3. Bruk følgende klemmer for din rørdiameteren:

1" rør	Store klemmer uten mellomlegg
7/8" rør	Store klemmer med mellomlegg
3/4" rør	Små klemmer med mellomlegg
4. Med skruer til klemmen mot baksiden av rullestolen, setter du inn klemmene ved å spre dem over ryggrorene (bilde 4). Juster klemmehøyden til 3/4" under den endelige Corbac-høyden og sørg for at begge klemmene er på samme høyde over seteskinne (bilde 5). Vent med å montere skruene.
5. Monter den justerbare Corbac-fatningen.
 - a. Fjern den justerbare Corbac-fatningen fra pappemballasjen. Ikke brett den ut og fjern tråddukoverlegget. Ikke brett den ut. Finn de store lommene under de justerbare stroppene.
 - b. Skyv den justerbare Corbac-fatningen over skyvehåndtakene til rullestolen og klemmene, ved å skyve håndtakene gjennom hullene i de øvre og sidestilte hjørnene av den store lommen (bilde 6).
 - c. Juster de justerbare skruer med klemmene og sett inn 10-32-skruene som følger med. Juster klemmerotasjonene slik at de samsvarer med den ønskede krumning til den justerbare fatningen. Stram skruene godt (bilde 7).
6. Stram til stroppene forsiktig. På noen stive modell rullestoler finner du den/de nederste stroppen(e) under oppstrammerstangen.
7. Trekk ned og fest den tynne klaffen til setet for å gi tilstrekkelig slark til å plassere en pute mot ryggrorene.

8. Monter seteputen på riktig sted.
9. Fortsett avsnittet "Montering av Corbac".


Monter Corbac over eksisterende ryggstøttepolstring med slynge

1. La eksisterende ryggstøttepolstring med slynge være på rullestolen.
2. Monter den justerbare Corbac-fatningen.
 - a. Fjern den justerbare Corbac-fatningen fra pappemballasjen. Ikke brett den ut.
 - b. Finn den store lommen under justeringstroppene.
 - c. Skyv den justerbare Corbac-montasjen over ryggstøttepolstringen på rullestolen. Sørg for at eksisterende polstring er satt inn i den store lommen. (Du må kanskje løsne stroppene litt.)
3. Stram til stroppene forsiktig. På noen stive modell rullestoler er de nederste stroppe(n) under oppstrammerstangen.
4. Trekk ned og fest den tynne klaffen til det justerbare setet for gi å tilstrekkelig slark til å plassere en pute mot ryggryene.
5. Monter seteputen på riktig sted.
6. Fortsett til avsnittet "Montering av Corbac".



Montering av Corbac

1. Overfør til rullestol.
2. Juster stroppene på fatningen for optimal balanse og torsoinnretning (bilde 8).
3. Juster thoraco-lumbar-bekken-støtter (TLP) (bilde 9).
 - a. Len fremover og plassere TLP-støttene (med tuppene innover) mot torsoen på ønsket sted i korsryggen.
 - b. Len deg tilbake for å feste kilene til fremsiden av den justerbare fatningen via borrelåsfestet.
 - c. TLP-støttene kan flyttes opp/ned, inn/ut og roteres. I noen tilfeller strekker de seg forbi bredden av rullestolrammen og kan trimmes.
 - d. Fortsett å gjøre justeringer i TLP-støttene inntil ønsket holdning og komfort er oppnådd.
4. Monter tråddukoverlegget (bilde 10).
 - a. Len fremover og trekk tråddukoverlegget over den justerbare fatningen og TLP-støttene.
 - b. Fest hakefestet ved den indre bunnen/forsiden av overlegget til løkkefestet på forsiden av den justerbare fatningen.
 - c. Len deg tilbake og fest de fire festebåndene til overlegget til baksiden av monteringsstroppene
 - d. Trekk bakstykket til tråddukoverlegget over de justerbare monteringsstroppene. Festeremsene på bakstykket vil feste seg til baksiden av det justerbare monteringsbåndet.
 - e. Etterjustering av TLP-støttene kan være nødvendig når overlegget er på plass. Bare fjern overlegget, juster plasseringen av TLP-støttene og monter overlegget på nytt.

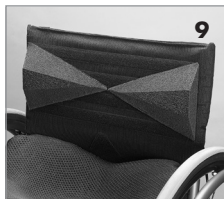






Innledende bruk

Før langvarig sitting er best å bruke Ride Corbac i en kort periode og kontrollere ethvert område som er i kontakt med ryggstøtten visuelt. Røde områder bør forsvinne i løpet av 10-30 minutter. Ta kontakt med legen eller terapeuten hvis rødheten varer i mer enn 30 minutter. Så lenge hudinspeksjoner ikke viser røde områder som varer mer enn 30 minutter, kan du trygt fortsette å bruke rullestolen. Hudkontroller bør gjøres minst hver dag, selv etter at hudtoleransen er fastslått. Fortsett å utføre rutineintermitterende trykkavlastningsteknikker (lene forover) som anbefales av helsepersonell.

⚠ **ADVARSEL:** Hvis rødhet forbundet med bruk av Corbac varer i mer enn 30 minutter, slutt å bruke den og ta kontakt med terapeuten eller legen din umiddelbart.

Oppfølging

Det anbefales å få helsepersonell til å kontrollere sitteholdning og hudintegriteten din minst hvert år, eller når du opplever en endring i vekt, holdning eller generell tilstand som kan påvirke din evne til å sitte trygt, komfortabelt og funksjonelt.

Klesvaskesymboler	
	Maskinvask varmt vann (40° C)
	Må ikke blekes
	Drypptørr
	Må ikke tørrrenses
	Må ikke strykes

Stell og vedlikehold av din Ride Corbac

Rengjøring av Corbac-tråddukoverlegget

- Fjern tråddukoverlegget fra Corbac.
- Fest borrelåsene til hverandre. Plasser i en glidelåsbag
- Vask i vaskemaskin eller for hånd (vanlig vaskemiddel/ikke blekemiddel).
- Heng til tork.

Rengjøring av den justerbare Corbac-fatningen

Vask den tynne klaffen, TLP-støttene og basiskomponentene etter behov med en fuktig klut eller et mildt desinfeksjonsmiddel.

FORSIKTIG: Ikke rengjør Corbac med isopropylalkohol eller andre kjemiske løsemidler.

Kjøretøyssikkerhet

⚠ **FARE FOR PERSONSKADE:** Corbac IKKE er dynamisk testet for bruk i motorkjøretøy. Corbac vil ikke gi tilstrekkelig støtdemping i et motorkjøretøy. Alvorlig skade eller død kan oppstå under en kjøretøysulykke dersom skikkelige sikkerhetsfunksjoner fra den opprinnelige utstyrproduzenten ikke benyttes.

1. Bytt alltid til bilsetet og sikkerhetsbeltene fra den opprinnelig utstyrproduzenten når du skal reise med motorkjøretøy.

Vedlikehold

Kontroller at Corbac fungerer som den skal og om deler av maskinvaren er løse, mangler eller er skadet minst hver 6. måned. Inspiser og stram alle komponenter i henhold til denne brukerhåndboken. Kontakt din autoriserte Ride Designs-leverandør om dersom komponenter er skadet eller mangler.

⚠ **IKKE** fortsett å bruke produktet hvis det er løse, manglende eller skadede komponenter.

Produktets levetid

Maksimal beregnet bruk av dette produktet er fire år.

Gjenbruk

⚠ FARE FOR PERSONSKADE: Ta kontakt med en autorisert Ride Designs-forhandler før du overfører den til en annen bruker. IKKE bruk produktet hvis skader oppdages.

Avhending

♻ Resirkuler komponenter og materialer i henhold til lokale, statlige og nasjonale forskrifter.

Garantierklæring

Den justerbare Ride Designs® Corbac™-ryggstøtten er nøye konstruert for å tilfredsstillere behov knyttet til kroppsholdning og hudintegritet. Denne garantien er gyldig i 24 måneder fra datoen den leveres til den opprinnelige kjøperen. Dersom det oppdages feil i materiale eller konstruksjon, vil Ride Designs reparere eller erstatte komponenten, etter eget skjønn. Denne begrensede garantien dekker ikke daglig slitasje eller skade som oppstår som følge av feilhåndtering, misbruk, forsømmelse eller unnlatelse av å følge instruksjonene for stell og vedlikehold.

Krav og reparasjoner bør behandles gjennom nærmeste autoriserte Ride Designs Rehab Technology-leverandør. Det kan være nødvendig med en kopi av salgskvitteringen utstedt til kjøperen av produktet for å behandle en reklamasjon.



Ride Corbac-ryggstøtten fungerer best når den brukes med en supplerende Ride Designs-pute

Ride Forward-puten passer best for mennesker med mild til moderat risiko for hudskader.

Oppnå en høy grad av hudbeskyttelse og funksjonell ytelse med **Ride Java-puten** (bare Ride Custom-puten kan gi en høyere grad av beskyttelse og støtte).



For folk som har høyere risiko for hudskader, og/eller mer utfordrende holdningsrelaterede behov, er **Ride Custom-puten** det ultimate innen holdningsstøtte og hudpleie. Den er formet spesielt for å støtte en persons unike størrelse, form, holdning og funksjonskrav. Kun tilgjengelig i USA.

Mer informasjon om hele sortimentet av Ride Motiv-puter er tilgjengelig på www.ridedesigns.com.

Installasjonsmerknader

Patenter: www.ridedesigns.com/patents
© 2015, Ride Designs. 090-005-B



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Tyskland